

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

### Назва медичного виробу:

- WM-61 Вимірювач артеріального тиску механічний "Professional", манжета без металевого кільця, латексна груша
- WM-62S Вимірювач артеріального тиску механічний, "Standard", в комплекті зі стетоскопом, манжета з металевим кільцем, латексна груша
- WM-63S Вимірювач артеріального тиску механічний, "Comfort", вбудований стетоскоп, манжета з металевим кільцем, латексна груша

Шановний користувачу! Вітаємо Вас з придбанням вимірювача артеріального тиску ТМ B.Well. Це медичний виріб, що призначений для вимірювання систолічного і діастолічного артеріального тиску методом Короткова. Виробник B.Well гарантує, що даний виріб виготовлений з високоякісних матеріалів і відповідає діючим стандартам безпеки.

Область використання: у лікувально-профілактичних закладах або для індивідуального використання з метою самоконтролю.

### Важливі переваги:

- Міцна і надійна манжета. Розмір 25-40 см.
- Високоточний манометр у металевому корпусі.
- Клапан з рівномірним випуском повітря.

### СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ

#### WM-61




#### WM-62S -

WM-63S WM-63S – голівка стетоскопа вбудована в манжету.



## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Даний прилад призначений для цілей, виключно визначених у даній інструкції.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що спричинені неналежним використанням.
- Не перекачуйте манжету більше 300 мм.рт.ст..
- Зберігайте у недоступному для дітей місці, прилад має дрібні деталі.

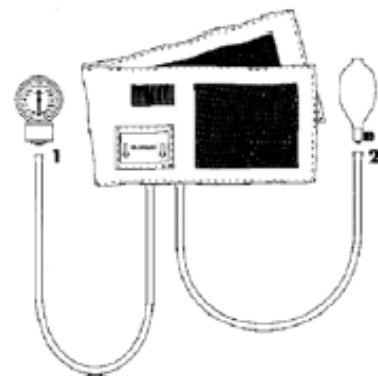

## ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ.

- Заборонено кидати прилад.
- Заборонено піддавати прилад дії екстремальних температур, надмірній вологості, дії сонячних променів.
- Зберігайте манжету повністю без повітря.
- Зберігайте прилад у чохлах.
- Витирайте манометр, манжету м'якою губкою.
- Прилад не потребує спеціальної стерильної обробки. Протирайте м'якими очищаючими засобами після кожного вимірювання.

## ЗБИРАННЯ ПРИЛАДУ.

Приєднайте до двох трубок, що виходять із манжети, відповідно грушу та манометр. Моделі WM-62S/WM-63S – приєднайте голівку стетоскопа до одинарного кінця U-подібної трубки, до подвійного кінця – металеві трубки стетоскопа.

## ВИМІРЮВАННЯ.

Перед початком вимірювання не переїдайте, не паліть та уникайте фізичного навантаження. Перед вимірюванням рекомендовано кількахвилинний відпочинок. Звільніть від одягу руку, на якій проводиться вимірювання, не закручуйте рукав, оскільки це може привести до передавлювання.

Нещільно накладена манжета може впливати на точність вимірювання.

Розташуйте манжету на плечі таким чином, щоб її край був на 2-3 см вище ліктьового згину.

Перевірте, що шланги проходять від манжети чітко по середині передпліччя, а помітка «ARTERY» знаходиться над ліктьовою ямкою.

Покладіть руку на стіл. Спокійно сидіть кілька хвилин перед вимірюванням.

Для моделей WM-61/WM62 встановіть голівку стетоскопа таким чином, щоб вона була або під манжетою, або на 1-2 см нижче манжети. В моделі WM-63S, оскільки голівка стетоскопа вбудована, переконайтесь, що вона знаходиться на 2-3 см вище ліктьового згину.

Закрийте клапан на груші, для накачування повітря рівномірно стискайте грушу в протилежній руці. Після того, як зникло відчуття пульсації в руці, продовжуйте ще на 30-40 мм.рт.ст перекачувати повітря.

Потім повільно відкрийте клапан, таким чином, щоб тиск у манжеті падав повільно (1-2 поділки в секунду). Коли тиск в манжеті почне знижуватись, ви стетоскопом почуєте тони. Відмітка початку вислуховування тонів і є систолічним тиском.

По мірі падіння тиску в манжеті продовжуйте вислуховувати тони, як тільки вони зникнуть, відповідне значення манометра і буде діастолічним тиском.

Після того, як тиск визначено, повністю випустіть повітря з манжети, зніміть її з руки, зніміть стетоскоп.

Повторюйте вимірювання кілька разів. Запишіть час, дату та показники тиску.

Увага. Тільки лікар має достатню кваліфікацію для інтерпретації показників вашого тиску.



## МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ.

Погана передача тонів	Перевірте, чи не забруднені навушники стетоскопа. Перевірте трубку стетоскопа на наявність тріщин, перекрутів. Перевірте цілісність мембрани. Перевірте достатній контакт голівки стетоскопа зі шкірою.
При накачуванні повітря тиск не збільшується	Перевірте, чи закритий клапан. Перевірте правильність приєднання манжети до груші і манометра. Перевірте відсутність витоків повітря в манжеті, трубках, груші.
Неможливо відрегулювати потрібну швидкість спуску повітря.	Від'єднайте клапан від груші, перевірте на відсутність перепон для повітря в клапані. Якщо клапан не працює, він потребує заміни.
В стані спокою стрілка манометра знаходиться не у положенні 0 +/- 3 мм.рт.ст.	Переконайтесь, що клапан повністю відкритий. Якщо відхилення більше 3 мм.рт.ст, зверніться до сервісного центру.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Вага модель WM-61: 340 г модель, WM-62S: 450 г, модель WM-63S: 440 г.

Діапазон вимірювання тиску: від 20 до 300 мм ртутного стовпа

Мінімальний крок вимірювання: 2 мм ртутного стовпа

Точність вимірювання тиску:  $\pm 3$  мм ртутного стовпа

Комплектація:

Модель WM-61: манжета для плеча, нагнітач з впускним клапаном, клапан випуску повітря, манометр медичний, сумка-чохол, керівництво по експлуатації, гарантійний талон

Моделі WM-62S / WM-63S: манжета для плеча, нагнітач з впускним клапаном, клапан випуску повітря, манометр медичний, стетоскоп (трубка бінауральна, трубка сполучна для стетоскопа, голівка для стетоскопа), сумка-чохол, керівництво по експлуатації, гарантійний талон

Маса, модель WM-61: 340 г

Маса, модель WM-62S: 450 г

Маса, модель WM-63S: 440 г

Виробник зберігає за собою право змінювати технічні характеристики приладу.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.** Рекомендовано зберігати при температурі  $-5$  до  $+40$  ° С та вологості повітря не більше 85%.

**ПРОТИПОКАЗАННЯ:** протипоказань не виявлено.

**УТИЛІЗАЦІЯ:** дозволена утилізація з побутовим сміттям.

**ГАРАНТІЯ.**

Виробник забезпечує **гарантійні зобов'язання протягом 60 місяців** з дати придбання приладу. Гарантійний термін для манжети – 6 місяців. Гарантійний термін для конектора, повітряних трубок, груші, стетоскопу – 12 місяців.

Гарантія не розповсюджується на чохол і упаковку.

Будь-який ремонт, що не входить до гарантійного випадку, проводиться за рахунок покупця.

Гарантійні обов'язки не включають в себе компенсацію шкоди, що спричинена внаслідок неправильного використання виробу або використання не за призначенням.










Гарантія не поширюється на комплектуючі, схильні до зносу, а також на сумочку і упаковку приладу.

При виявленні несправності протягом гарантійного строку, прилад буде відремонтовано, а в разі неможливості проведення ремонту, буде замінений за рахунок продавця.

Гарантійне обслуговування виробу не проводиться при виявленні на корпусі слідів механічного пошкодження, стороннього втручання, вм'ятин, тріщин, слідів вологи, слідів впливу хімічних речовин, фізичних факторів.

⚠ Гарантійні зобов'язання дійсні тільки за умови повністю заповненого гарантійного талона й наявності печатки торгового підприємства або печатки центру технічного обслуговування. Продавець зобов'язаний видати гарантійний талон.

**Спеціальні символи.**

	Ознайомтесь з інструкцією із використання.
	Серійний номер виробу.
	Номер партії.
	Артикул.
	Виробник.
	Обмеження мінімальної та максимальної температури.
	СЄ маркування
	Берегти від вологи.
	Не утилізувати з побутовим сміттям.

**B. WELL SWISS AG**

Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Ваше Здоров'я Трейдинг», 03179, м.Київ, вул.Чорнобильська, 19-102, тел. (044) 221-68-20, [www.vztrading.com.ua](http://www.vztrading.com.ua)

Дата останнього перегляду: Серпень 2018.